

GAF

DISTRIBUIDORA DEL NORTE

Mission®

Saliva Alcohol Test Strips

Prueba de Alcohol en Saliva

Acerca de la Prueba

La prueba de detección de alcohol en saliva **Mission** permite realizar exámenes evidenciales para detectar la presencia de alcohol.

La tira de alcohol **Mission** consiste en una tira de plástico con una almohadilla reactiva en la punta de la misma, la almohadilla reactiva emplea un sistema químico de fase sólida que efectúa una reacción enzimática de alta especificidad, además de ser económica, confiable, y fácil de utilizar, por lo que es una excelente opción para realizar exámenes de alcohol ya sea por sospecha, después de un accidente, o de manera aleatoria en su empresa o institución.



Saliva Alcohol Test Strips Saliva

El Examen de Alcohol en **Saliva** es una prueba rápida que puede ser realizada sin ningún instrumento adicional.

Esta prueba utiliza un sistema de enzima para la detección de alcohol en saliva a niveles de concentración en la sangre de 0.02% o mayores.

La prueba de detección de alcohol en saliva consiste en una tira de plástico con una almohadilla reactiva en la punta de la misma. La almohadilla reactiva emplea un sistema químico de fase sólida que efectúa una reacción enzimática de alta especificidad.

En contacto con soluciones de alcohol la almohadilla reactiva cambiará rápidamente de color dependiendo del grado de alcohol presente, este cambio de color es proporcional a la concentración de alcohol en la muestra de saliva.



Al compararse los parámetros de color impresos en el sobre con el color de la almohadilla reactiva de la tira, una concentración aproximada de alcohol en sangre (BAC) puede determinarse.

La Prueba de Detección de Alcohol en Saliva de **GAF Distribuidora** es económica, confiable, y fácil de utilizar, por lo que es una excelente opción para realizar exámenes evidenciales ya sea por sospecha, luego de un accidente, o de manera aleatoria en su empresa o institución.

Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com

Ventajas y Beneficios

- **Rápido y Fácil:** La tira de alcohol en saliva **Mission** es una prueba rápida y de fácil detección. No requiere equipo adicional.
- **Altamente Recomendable:** Recomendado para uso en el hogar, escuelas, lugares de trabajo, centros de rehabilitación, hospitales etc.
- **Detecta Múltiples Concentraciones:** Una sola tira detecta múltiples concentraciones de BAC de 0.02 a 0.30 %.
- **Económica:** Con una única tira tiene una excelente relación costo/beneficio y efectividad con una pequeña muestra.

GAF


DISTRIBUIDORA DEL NORTE

Mission®

ACON®

Modo de Empleo


- 1 Recolecte una muestra de saliva en el recipiente (Incluido).

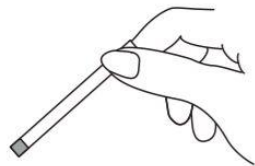

- 2 Sature de saliva la punta de la tira por 5 segundos.



- 3 Compare los resultados con la tabla de colores que indica el %BAC.

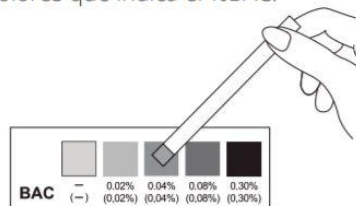

Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com