

GAF

DISTRIBUIDORA DEL NORTE

ACCUTREND PLUS monitor sanguíneo

Equipo portátil de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de cuatro parámetros en sangre capilar, arterial, venosa:

- Glucosa
- Colesterol Total
- Triglicéridos
- Lactato



Especificaciones:

Equipo portátil de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de glucosa, colesterol total, triglicéridos y lactato, en sangre capilar, arterial, venosa, con un rango de medición de: glucosa 20 a 600 mg/dl, colesterol total 150 a 300 mg/dl, triglicéridos 70 a 600 mg/dl y lactato 0.8 a 22 mg/dl, volumen de muestra 25 µl por cada parámetro, temperatura de operación de 10-40 °C, humedad relativa no condensable de 10-85% utiliza 4 baterías “AAA” no recargables, memoria cíclica de 100 resultados por parámetro, calibración por medio de tira codificadora (incluida en cada frasco de tiras), tiempo de reacción de: glucosa 12 segundos, colesterol total 180 seg, triglicéridos 174 seg y lactato 60 segundos, principio de medición espectrofotometría de reflectancia, garantía de un año.

Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com

GAF

DISTRIBUIDORA DEL NORTE

Instrucciones de Uso:

1. Saque la tira codificadora y de la de alta en el equipo para que este pueda reconocer las tiras reactivas.
2. Saque una tira reactiva del frasco y colóquela en el equipo, abra la tapa de la cámara de medición.
3. Realice la antisepsia del dedo a puncionar.
4. Realce la punción y estimule el dedo para obtener la muestra de sangre.
5. Coloque la muestra en la tira y cierre la tapa de la cámara de medición y espere el resultado.
6. Abra la tapa de la cara de medición para retirar la tira del equipo y deseche adecuadamente.

NOTA IMPORTANTE: Realice las tomas de muestra cuando el paciente se encuentre en ayuno de 8 a 12 horas.



Incluye	1 monitor y 1 manual
Tipo	Sistema para la determinación de glucosa, colesterol total, triglicéridos y lactato en sangre
General	
Marca	Accutrend

Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com